


AND A&D Medical

Wrist Digital Blood Pressure Monitor

Model UB-511

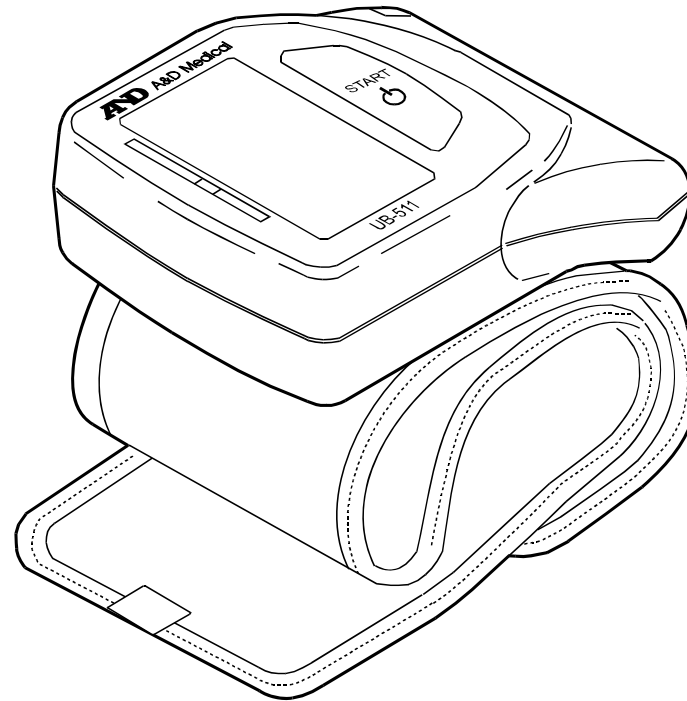

WM+PD4000888A

English

Français

Español

Italiano

中文

Sommaires(s)

Chers clients.....	2
Remarques Préliminaires.....	2
Précautions.....	2
Nomenclature.....	3
Symboles.....	4
Utilisation de l'appareil.....	5
1. Mise en place / Remplacement des piles.....	5
2. Serrage du brassard.....	6
3. Comment faire des mesures correctes.....	7
4. Pendant la mesure.....	7
5. Après la mesure.....	7
Les Mesures.....	8
Les Mesures.....	9
Consignes et observations pour une mesure correcte.....	9
Qu'est-ce qu'une fréquence cardiaque irrégulière ?.....	10
Indicateur de la progression de la pression.....	10
Indicateur de la classification suivant l'OMS.....	11
Pression Sanguine.....	11
Qu'est-ce que la pression sanguine?.....	11
Qu'est-ce que l'hypertension et comment la contrôler?.....	11
Comment mesurer la pression sanguine chez soi?.....	12
Classification de la pression sanguine suivant l'OMS.....	12
Variations de la pression sanguine.....	12
Recherche des Pannes.....	13
Entretien.....	14
Fiche Technique.....	14

Chers clients

Nous vous remercions de votre confiance. Le moniteur de tension artérielle A&D que vous venez d'acquérir, tout en étant d'une utilisation facile, est sur le plan technologique l'un des appareils les plus avancés du marché.

Lisez ce manuel entièrement et soigneusement avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.


Remarques Préliminaires

- Cet appareil est conforme à la directive européenne 93/42 EEC des appareils médicaux avec le marquage **CE**⁰³⁶⁶ de conformité accompagné du numéro de référence de l'autorité désignée.
- Cet appareil est conçu pour tous à l'exception des nouveaux nés et des enfants.
- Lieu d'utilisation
Cet appareil est destiné à une utilisation domestique.


Précautions

- Cet appareil est équipé de pièces de précision. C'est pourquoi il faut éviter de l'exposer à de fortes températures, à une humidité extrême ou au soleil. De même, il faut éviter les chocs et le protéger de la poussière.
- Nettoyez cet appareil avec un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais de diluant, d'alcool, de benzène ou de chiffons mouillés.
- Evitez de plier fortement le brassard pendant une longue durée, parce qu'un tel traitement peut raccourcir la durée de vie des composants.
- L'appareil et le brassard ne sont pas imperméables. Evitez de les mouiller avec de l'eau, de la transpiration ou la pluie.
- Les mesures peuvent être faussées si l'appareil est utilisé près d'un poste de télévision, un four à micro ondes, un téléphone cellulaire, des appareils à rayon X ou tout autre appareil dégageant de forts champs électriques.
- L'appareil usé, les pièces et les piles ne doivent pas être jetés comme les déchets ménagers ordinaires, ils doivent être traités conformément à la législation en vigueur.


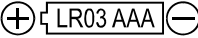


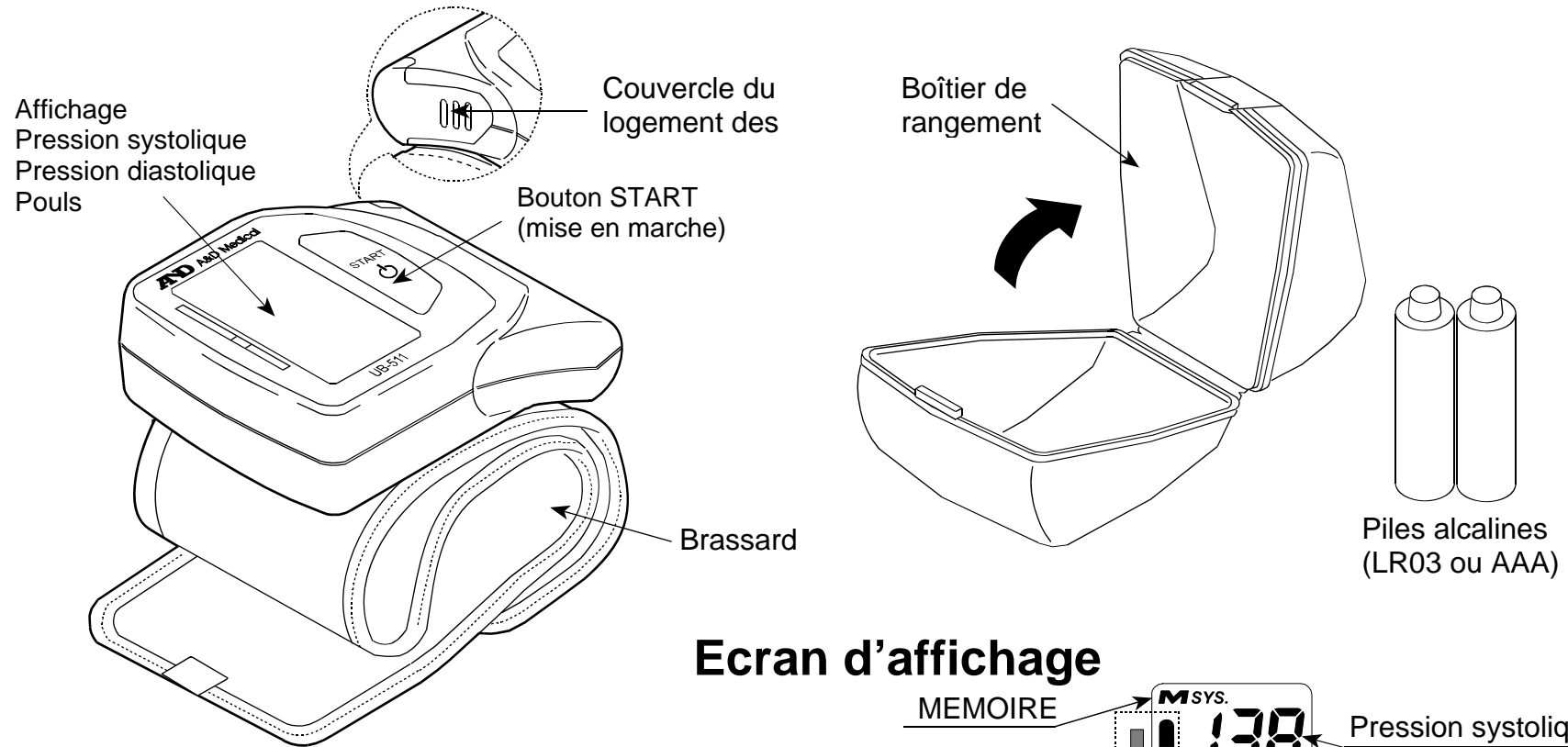



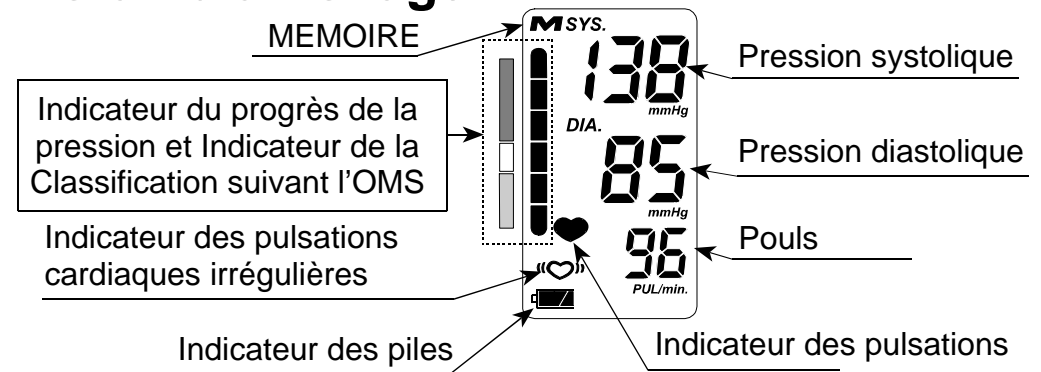

Nomenclature




Ecran d'affichage



Symboles


Symboles	Fonction / Signification	Traitement
	Hors/en circuit de l'appareil	_____
	Repères pour installer les piles	_____
	Courant continu	_____
SN	Numéro de série	_____
2002 	Date de fabrication	_____
	Type BF: L'appareil, le brassard et les tubes isolants ont été conçus de manière à fournir une protection particulière contre les électrochocs.	_____
	Apparaît lorsque la mesure est en cours et clignote quand les pulsations cardiaques sont détectées.	L'appareil est en train de mesurer; restez calme.
	Cet indicateur détecte les pulsations cardiaques irrégulières ou autres mouvements de corps excessifs pendant la mesure.	_____
M	Les mesures précédentes conservées dans la MEMOIRE.	_____
 Full Battery	L'indicateur de la tension des piles pendant la mesure.	_____
 low Battery	La tension des piles est faible quand il clignote.	Remplacer toutes les piles par des neuves quand cet indicateur clignote.
Err	Apparaît en cas de fluctuation de la pression due à un mouvement pendant la mesure.	Recommencez la mesure. Restez parfaitement tranquille pendant la mesure.
	Apparaît si la différence entre la pression systolique (tension maxima) et la pression diastolique (tension minima) est inférieure à 10 mmHg.	Attachez le brassard correctement, et recommencez la mesure.
Err Err Err	Apparaît lorsque la pression n'augmente pas pendant le gonflage du brassard.	
	Apparaît lorsque le brassard n'est pas attaché correctement.	
E	La pression n'est pas détectée correctement.	
SYS	Pression systolique en mmHg.	_____
DIA	Pression diastolique en mmHg.	_____
PUL./min	Pouls: nombre de pulsations cardiaques par minute.	_____
 0366	Label des appareils médicaux conformes à la directive européenne.	_____

Symboles	Fonction / Signification	Traitement
	Marquage WEEE	_____



Utilisation de l'appareil

1. Mise en place / Remplacement des piles

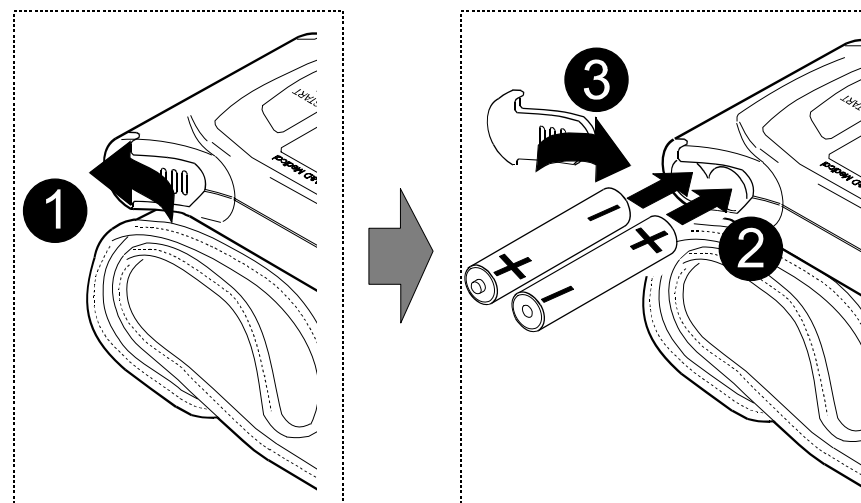1. Glissez le couvercle des piles en arrière comme indiqué, afin de l'enlever de l'appareil.
2. Insérez les deux piles de dimensions AAA ou LR03 dans le logement, en respectant les positifs (+) et négatifs (-) comme indiqué dans leur logement et sur le brassard.
3. Glissez le couvercle des piles en avant sur l'appareil.



ATTENTION

- Respectez bien les polarités, sinon l'appareil ne fonctionnera pas
- Quand  (marque des piles faibles) apparaît sur l'affichage, remplacez les deux piles en même temps par des neuves. Ne mélangez pas les piles anciennes et nouvelles. Cela peut raccourcir la durée de vie des piles, ou provoquer un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- La marque  (pile faible) n'apparaît pas lorsque les piles sont épuisées.
- La durée de vie des piles varie avec la température ambiante et peut être raccourcie par des températures basses.


- Enlevez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. Les piles peuvent fuir et endommager votre appareil.
- Utilisez les piles spécifiées seulement. Les piles fournies avec l'appareil sont destinées à la démonstration et peuvent avoir une durée de vie plus courte.

Utilisation de l'appareil

2. Serrage du brassard

1. Ajustez le brassard autour de votre poignet environ 1 cm au dessous de votre main, comme indiqué dans la figure de droite.
2. Serrez le brassard fermement, en utilisant la bande Velcro.

Note: Pour des mesures appropriées, serrez le brassard fermement et faites la mesure sur un poignet nu (poignet gauche de préférence et sans montre).

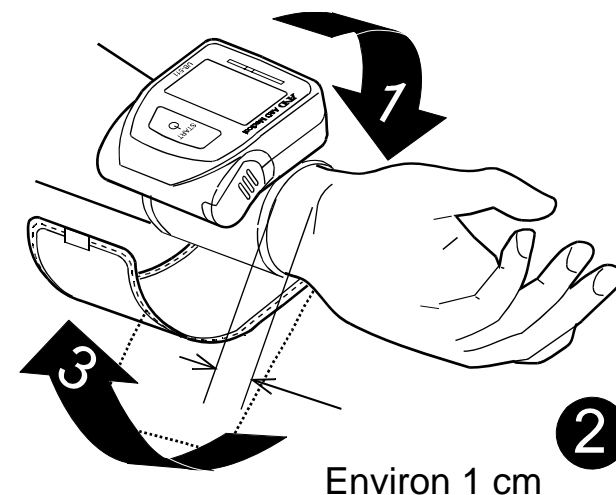

3. Comment faire des mesures correctes

Pour obtenir la meilleure précision la meilleure lors de la mesure de la pression sanguine :

- S'asseoir confortablement à une table. Poser son bras sur la table.
 - Se relaxer pendant 5 à 10 minutes avant de commencer les mesures.
 - Levez votre main pour que le brassard soit au même niveau que votre cœur à l'aide d'un support afin que le bras reste décontracté.
 - Bouger le moins possible et rester calme pendant les mesures.
 - Ne pas faire de mesure juste après un effort physique ou un bain.
- Nous vous recommandons de vous reposer de vingt à trente minutes avant de faire la mesure.
- Mesurez votre pression sanguine à peu près à la même heure chaque jour.



4. Pendant la mesure

Pendant la mesure, il est normal que l'on sente que le brassard est très serré. (Ne pas s'inquiéter.)

5. Après la mesure

Après la mesure, appuyez sur le bouton **START** pour éteindre l'appareil. Enlevez le brassard et notez votre tension et votre pouls.

Note: L'appareil est fourni avec une fonction de coupure du courant automatique, qui met l'appareil hors circuit automatiquement une minute après la mesure.

Attendez au moins une dizaine de minutes avant de remesurer votre tension (ou celle d'une autre personne) à des fins de confirmation.

Les Mesures


Note: Le UB-511, une fois utilisé, assurera un gonflage opportun à l'utilisateur, basé sur le mesurage précédent.

1. Asseyez-vous confortablement en mettant le brassard au même niveau que votre cœur et relaxez-vous.
2. Appuyez sur le bouton START.
La moyenne des pressions sanguines enregistrées et le numéro de donnée sont affichés brièvement.
A ce moment-là, l'affichage change comme indiqué sur la figure de droite au moment où la mesure commence.
Le brassard commence à gonfler. Il est normal que l'on sente que le brassard serre fortement le poignet.

Note: Si vous désirez arrêter le gonflement quelque (ce) soit le moment, appuyez de nouveau sur le bouton START.

3. La mesure commence automatiquement quand la pressurisation démarre, et la marque ♥ (des pulsations) clignote.
4. Lorsque les mesures sont finies, les lectures des pressions systolique et diastolique ainsi que le nombre de pulsations sont affichées.
Le brassard finit de se dégonfler en chassant l'air restant.
5. Appuyez de nouveau sur le bouton START pour éteindre l'appareil.
Retirez le brassard.

*Note: L'appareil est fourni avec une fonction de coupure du courant automatique.
Attendez au moins dix minutes avant de refaire les mesures sur la même personne.*

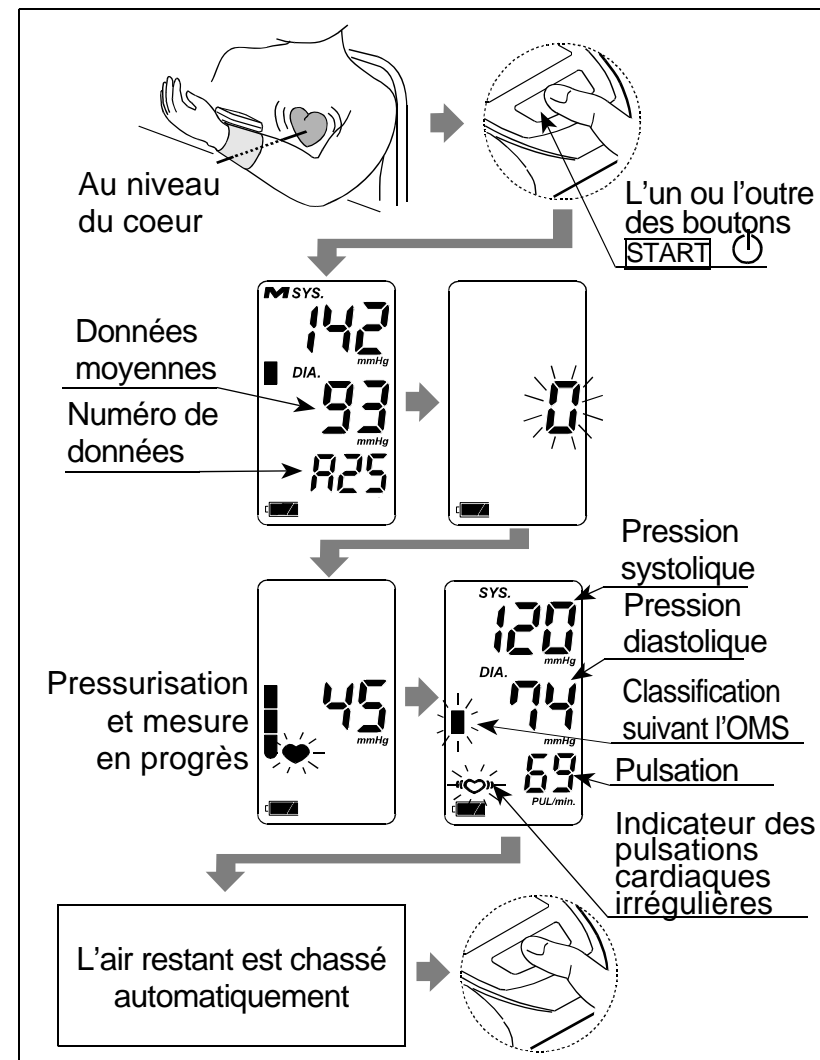


Les Mesures

Consignes et observations pour une mesure correcte

- ❑ Asseyez-vous confortablement. Placez le bras (gauche de préférence) sur une table ou un autre support de manière à ce que le centre du brassard soit à la même hauteur que le coeur.
- ❑ Détendez-vous pendant cinq à dix minutes avant de commencer la mesure. Si vous êtes énervés ou au contraire déprimés, cela se reflètera sur votre tension de même que sur votre pouls.
- ❑ La tension de tout individu varie constamment selon ce qu'il fait et ce qu'il mange. D'autre part, certaines boissons ont un effet très fort et très rapide sur la tension artérielle.
- ❑ La pression sanguine d'un individu varie constamment, dépendant sur ce qu'il est en train de faire et ce qu'il a mangé. Ce que vous buvez peut avoir un effet très fort sur votre pression sanguine take off (same sentence) Delete.
- ❑ Au cas où l'appareil détecte une condition anormale, il s'arrête de mesurer et affiche un symbole d'erreur. Voir la page 4 pour la description des symboles.
- ❑ Cet appareil est conçu pour mesurer la tension artérielle des adultes uniquement. Avant de l'utiliser pour mesurer la tension d'un enfant, veuillez en discuter avec votre médecin. Ne laissez jamais un enfant prendre lui-même sa tension sans surveillance.

Mode Opérateur

1. Mesure normale avec les données conservées (Voir la page 8)
Appuyez sur le bouton **START**. La pression sanguine est mesurée et les données sont conservées dans l'appareil. L'appareil peut stocker les trentes dernières données en mémoire.
2. Rappel des données en mémoire
Appuyez sur et tenez le bouton **START** pour rappeler les données. Les données conservées apparaissent automatiquement dans l'ordre des dernières données.

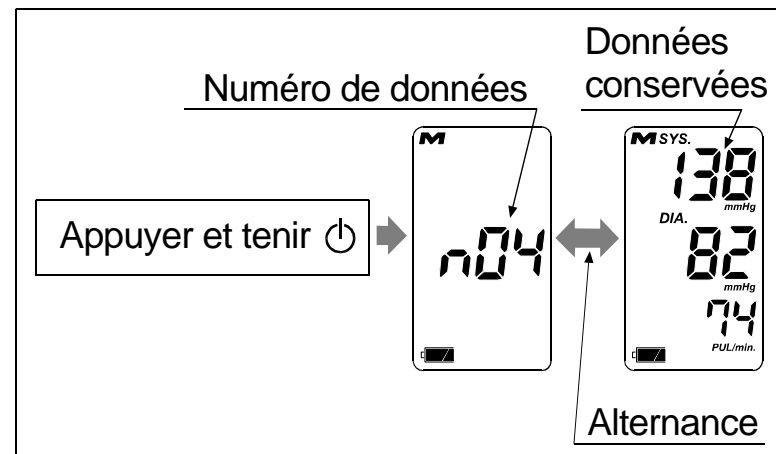

3. Effacement des données

Enlevez les piles pour effacer toutes les données. Les installer de nouveau.


Qu'est-ce qu'une fréquence cardiaque irrégulière ?

Le moniteur de la pression sanguine "Modèle UB-511" permet la mesure d'une pression sanguine et du pouls, même quand une pulsation cardiaque irrégulière se produit. Une pulsation cardiaque irrégulière est définie comme une pulsation du cœur qui dévie de 25 % de la moyenne de toutes les pulsations du cœur pendant la mesure de la pression sanguine. Il est important que vous vous détendiez, restiez calme et ne parliez pas pendant les mesures.

Note: Si vous voyez fréquemment l'indicateur ((♥)), il est recommandé de contacter votre médecin afin de faire un diagnostic plus précis et de dépister un éventuel risque d'arythmie.


Indicateur du progrès de la pression

L'indicateur suit le progrès de la pression pendant la mesure.

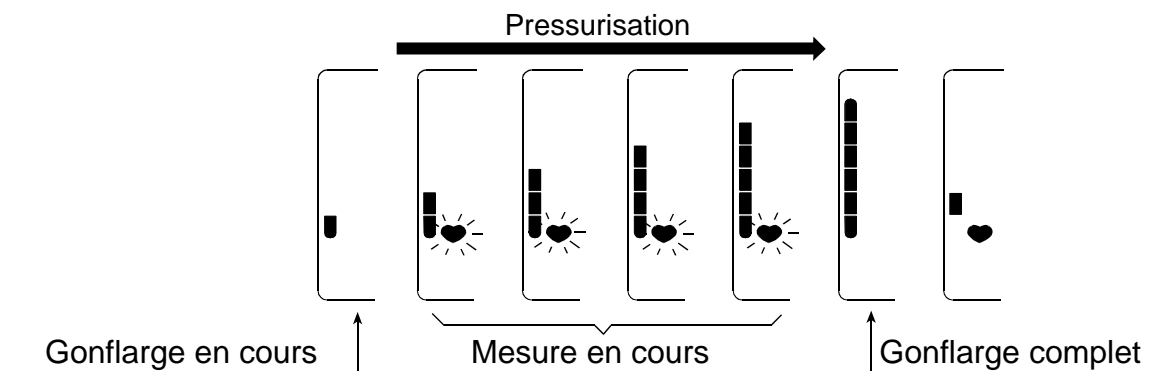

Indicateur de la classification de la pression sanguine suivant l'OMS

Chacun des six segments d'indicateur du progrès de la pression correspondent à la classification de la pression sanguine suivant l'OMS, décrit à la page suivante.

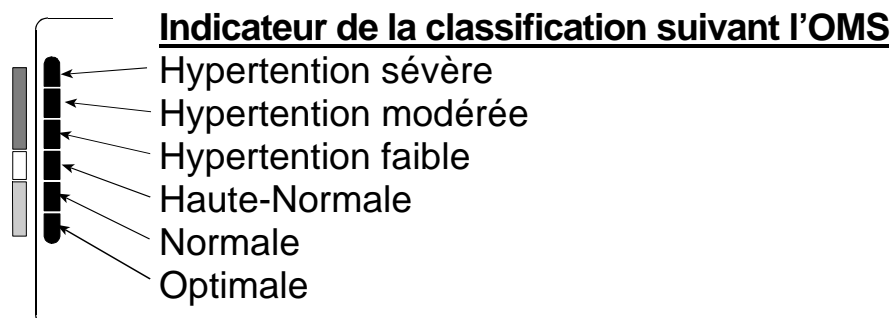

Exemple:

Hypertension modérée	Hypertension faible	Haute-Normale
<p>SYS. 174 mmHg DIA. 102 mmHg PUL/min. 87</p>	<p>SYS. 147 mmHg DIA. 98 mmHg PUL/min. 87</p>	<p>SYS. 134 mmHg DIA. 87 mmHg PUL/min. 87</p>

Pression Sanguine

Qu'est-ce que la pression sanguine?

La pression sanguine est la force avec laquelle le sang vient frapper contre les parois des artères. La pression systolique se produit lorsque le cœur se contracte. La pression diastolique se produit lorsque le cœur se détend. La pression sanguine est mesurée en millimètre de mercure (mmHg). La pression sanguine naturelle d'un individu est représentée par la pression fondamentale qui est mesurée avant toute activité, le matin au lever du lit, et avant de manger ou de boire.

Qu'est-ce que l'hypertension et comment la contrôler?

L'hypertension est une tension artérielle (ou plus exactement une «pression sanguine») anormalement élevée. Non surveillée, l'hypertension peut provoquer de nombreux problèmes de santé, notamment une attaque d'apoplexie ou une crise cardiaque.

L'hypertension peut être contrôlée en changeant son style de vie, en évitant tout stress et avec des médicaments sous surveillance médicale.

Pour empêcher l'hypertension ou la garder sous contrôle:

- Ne pas fumer.
- Réduire sa consommation de sel et de graisse.
- Maintenir un poids adéquat.
- Faire régulièrement des exercices physiques.
- Effectuer régulièrement des visites médicales.


Comment mesurer la pression sanguine chez soi?

Lorsque la tension est mesurée à l'hôpital ou dans le cabinet du médecin, l'on ne parvient pas toujours à se décontracter, ce qui peut avoir pour effet de faire monter la tension de 25 à 30 mmHg plus élevée que la tension mesurée chez soi. Le fait de mesurer sa tension tranquillement chez soi réduit les influences extérieures sur la valeur de la tension, complète les mesures effectuées par le médecin et permet d'établir un relevé plus précis et plus complet de sa tension artérielle.

Classification de la pression sanguine suivant l'OMS

Les critères d'évaluation pour une haute pression sanguine, sans regarder l'âge, ont été établis par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme indiqué dans le graphique ci-contre.

Origine : Journal de l'hypertension 1999 Vol. 17 N° 2

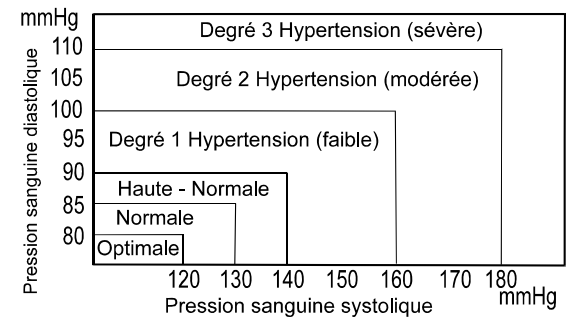


Variations de la pression sanguine

La tension artérielle (ou pression sanguine) d'un individu varie fortement selon le moment de la journée et selon la saison. Ainsi, elle peut varier de 30 à 50 mmHg dans une même journée selon un ensemble de conditions. Chez les personnes hypertendues, ces variations sont souvent encore plus prononcées.

Normalement, la pression augmente pendant le travail ou le sport et tombe à son plus bas niveau pendant le sommeil. Par conséquent ne pas trop s'inquiéter des résultats d'une seule mesure.

Mesurez votre tension tous les jours à la même heure (en suivant la procédure décrite dans ce manuel) pour connaître votre pression sanguine

Variation typique au cours de la journée (mesures effectuées toutes les cinq minutes)

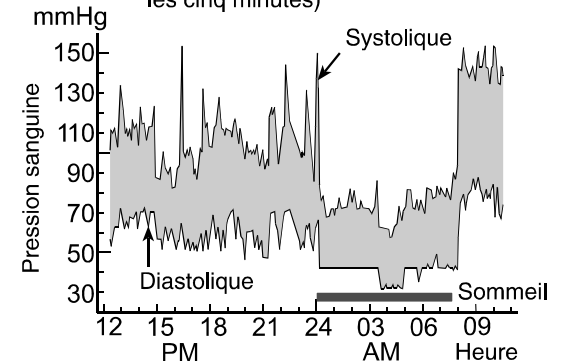

normale. Ces mesures quotidiennes vous permettront d'établir un relevé plus complet de votre tension. Veuillez à bien noter la date et l'heure lorsque vous enregistrez votre pression. Consultez votre médecin pour interpréter les données recueillies.

Recherche des Pannes

Problème	Cause probable	Traitement recommandé
Rien n'apparaît sur l'affichage, même lorsque l'on met l'appareil en marche.	Les piles sont épuisées.	Remplacer les piles usées par des neuves.
	Les bornes des piles ne sont pas dans le bon sens.	Mettre les piles dans le bon sens en faisant correspondre la borne positive et négative comme indiqué sur le brassard.
Le brassard ne se gonfle pas.	La tension des piles est trop faible. <input type="checkbox"/> le témoin des piles faibles apparaît. [Si les piles sont épuisées, ce témoin n'apparaît pas.]	Remplacez les deux piles par des neuves.
L'appareil ne prend pas les mesures. Les lectures sont trop hautes ou trop basses.	Le brassard est mal serré.	Serrer correctement le brassard.
	Vous avez bougé votre bras ou autre pendant la mesure.	Ne pas bouger et rester calme pendant la mesure.
	Le brassard est mal placé.	S'asseoir confortablement et ne pas bouger. Positionner son bras sous un support de manière à ce que le brassard soit au même niveau que le coeur.
	_____	Si votre pouls est faible ou irrégulier, l'appareil aura des difficultés à déterminer votre pression sanguine.
Autres	La valeur est différente de celle mesurée dans une clinique ou chez le médecin.	Voir le paragraphe 3. "Comment mesurer la pression sanguine chez soi ?".
	_____	Retirer les piles. Les remettre correctement en place et essayer à nouveau de mesurer.



Note: Si les remèdes décrits ci-dessus ne suffisent pas pour résoudre les problèmes, contactez votre revendeur. N'essayez pas d'ouvrir ou réparer l'appareil vous-même, cela rendrait votre garantie invalide.

Entretien

Ne pas ouvrir l'appareil car il comporte des composants électriques sensibles et une unité d'air complexe qui pourraient être endommagés. Si vous n'arrivez pas à situer un problème avec le tableau de recherche de problèmes, demandez au service après vente de votre revendeur ou du groupe de service A & D. Le groupe de service A & D vous fournira des informations techniques sur les fournisseurs agréés, les pièces et les unités de rechange.

Cet appareil a été dessiné et fabriqué pour une longue période de service. Mais il est généralement recommandé de le faire vérifier tous les 2 ans pour assurer le fonctionnement correct et la précision. Veuillez contacter votre revendeur autorisé ou le groupe de service A&D pour l'entretien.

Fiche Technique

Type	UB-511	Test clinique	Conformément à ANSI / AAMI SP-10 1992
Méthode de mesure	Mesure oscillométrique	EMC	IEC 60601-1-2: 2001
Plage de mesure	Pression : de 20 à 280 mmHg Pouls : de 40 à 180 pulsations / minute	Condition de fonctionnement	de +10°C à + 40°C (hum. rel. de 30 à 85%)
Précision de mesure	Pression : ± 3 mmHg ou 2%, celle qui est la plus élevée Pouls : $\pm 5\%$	Condition de stockage	de -10 °C à + 60°C (hum. rel. de 30 à 85%)
Consommation électrique	Piles alcalines 2 \times 1.5V (LR03 ou AAA)	Dimensions	environ 63 [l] x 56 [h] x 21 [p] mm
Circonférence du poignet	de 13.5 à 21.5 cm	Poids	environ 82 g sans les piles
Classification	Type BF 		 0366

Note: Les spécifications sont susceptibles de changer pour des raisons d'amélioration sans aucun préavis.



A&D Co.,LTD.

1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama 364-8585 JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111 Fax: [81] (48) 593-1119

A&D INSTRUMENTS LTD.

<Authorized Representative Established in the European Community>

Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park,
Abingdon, Oxon OX14 1DY United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420 Fax: [44] (1235) 550485

A&D MERCURY PTY. LTD.

32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031 AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100 Fax: [61] (8) 8352-7409