

Precision Health Scale

UC-324NFC

Instruction Manual
Original

ENGLISH

Manuel d'instructions

FRANÇAIS

Manual de Instrucciones

ESPAÑOL

Manuale di Istruzioni

ITALIANO

Bedienungsanleitung

DEUTSCH

Índice

Antes del uso

Precauciones	1
Componentes de la báscula.....	2
Símbolos de la pantalla	3
Función de apagado automático.....	3
Función de Comunicación de campo próximo (NFC)	3
Colocación (o cambio) de las pilas	4
Medición de su peso sobre una alfombra	4

Operaciones

Ajuste de la unidad	5
Ajuste de la memoria	6
Medición de su peso con la función NFC.....	7

Referencias

Mantenimiento de la báscula	8
Antes de solicitar una reparación.....	8
Precaución al usar la función NFC.....	9
Especificaciones	9


Precauciones

- Lea este folleto antes de utilizar la báscula.
- Coloque la báscula sobre una superficie nivelada y sólida, como suelo de baldosas, madera o laminado.
- No coloque la báscula sobre una superficie blanda, mojada o resbaladiza. Si la báscula debe utilizarse sobre una alfombra, asegúrese de colocar las patas adicionales de plástico, tal como se muestra en la página 4.
- La báscula contiene piezas delicadas de alta precisión. Evite situaciones extremas en lo referente a temperatura, humedad, luz solar directa, golpes, vaho y polvo.
- No se suba a la báscula con los pies mojados. Asegúrese de tener los pies secos para evitar resbalarse o herirse gravemente.
- Súbase con cuidado a la parte central de la báscula.
- Un cuidador debe ayudar cuando un discapacitado utiliza la báscula.
- Consulte a su médico antes de iniciar una dieta o hacer ejercicio.
- No desmonte ni modifique la báscula.


Indicaciones de uso

- Esta báscula está diseñada para uso personal.

Componentes de la báscula

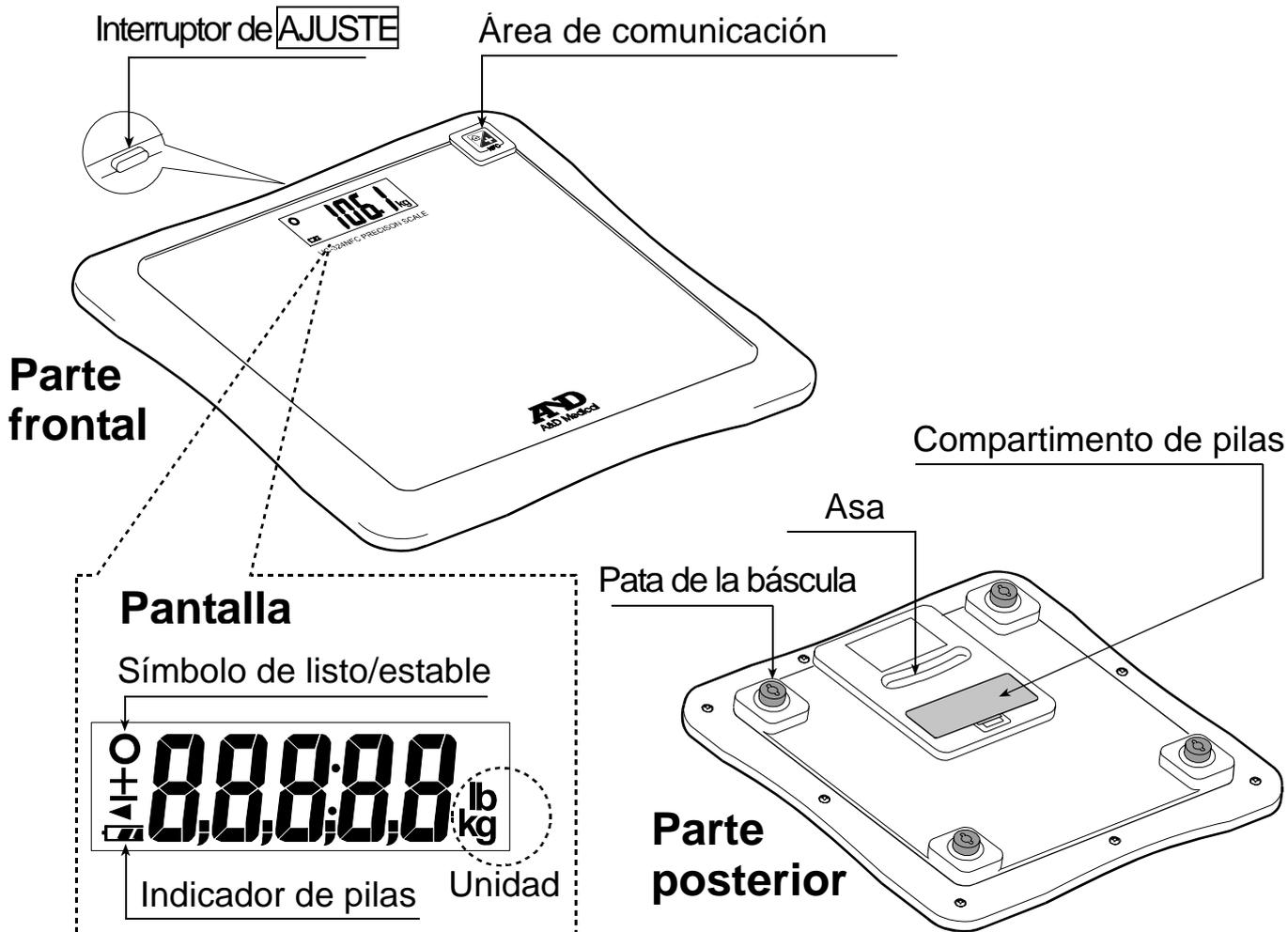

Accesorios

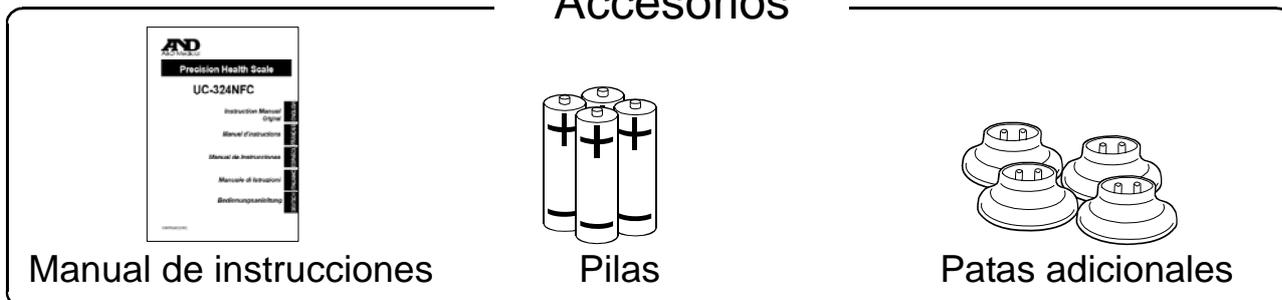

Símbolos de la pantalla

Símbolos	Nombre	Descripción
	Símbolo de listo/estable	Este símbolo aparece cuando la indicación de la medición es estable.
 ↓ 	Indicador de pilas Indicador de nivel bajo de las pilas	El indicador de potencia de pilas normal con la carga restante Si aparece este símbolo, cambie las cuatro pilas por nuevas.
	Etiqueta WEEE	—
	Marca CE	—

Función de apagado automático

La báscula tiene una función de “apagado automático”.

- Si aparecen “0.00 kg /0.0 lb” y el símbolo de listo/ estable  durante unos cuarenta y cinco segundos, la báscula se apagará automáticamente.
- Si aparecen el símbolo  y el peso durante unos tres minutos, la báscula se apagará automáticamente.

Función de Comunicación de campo próximo (NFC)

Para transmitir los datos a o de la báscula, se necesitan los dispositivos de comunicación que cumplen las especificaciones de comunicación de la báscula.

Ejemplos de dispositivos de comunicación que cumplen

- Teléfono móvil compatible con NFC
- Ordenador personal con lector/escritor NFC
- Punto de acceso

Nota

- Para obtener información sobre los métodos y las aplicaciones de comunicación para los dispositivos de comunicación, consulte los manuales de instrucciones para los dispositivos.


Colocación (o cambio) de las pilas

Precaución

- Inserte cada pila con sus terminales positivo (+) y negativo (-) bien alineados con los símbolos correspondientes en el compartimento de las pilas.
- Si las pilas se colocan incorrectamente, pueden tener fugas.
- Cambie las cuatro pilas por otras nuevas cuando aparezca el símbolo .
- No mezcle pilas nuevas y usadas. Podría dañarse la báscula o acortarse la duración de las pilas.
- El símbolo  no aparece cuando las pilas están totalmente agotadas.
- La duración de las pilas depende de la temperatura ambiente, del tipo de pila y del uso.
- Si no va a utilizar la báscula durante un periodo de tiempo prolongado, extraiga las pilas del compartimento de las pilas. Pueden tener fugas y dañar la báscula.
- Las pilas suministradas con la báscula son de prueba solo y pueden tener una duración limitada.

Procedimiento de colocación (o cambio) de las pilas

1. Abra la tapa del compartimento de las pilas en la parte inferior de la báscula.
2. Coloque las cuatro pilas nuevas con sus terminales positivo(+) y negativo (-) bien alineados con los símbolos correspondientes en el compartimento de las pilas.
3. Cierre la tapa del compartimento de pilas.

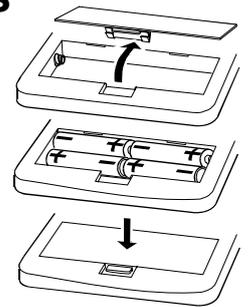


Medición de su peso sobre una alfombra

Coloque la báscula sobre una superficie nivelada y sólida, como suelo de baldosas, madera o laminado.

Si la báscula debe utilizarse sobre una alfombra, asegúrese de colocar las patas adicionales de plástico.

Procedimientos para colocar las patas adicionales

1. Cada pata adicional tiene dos clavijas. Haga coincidir las clavijas con los orificios de la pata de la báscula e insértelas con firmeza.
2. Coloque las patas adicionales en los cuatro soportes.

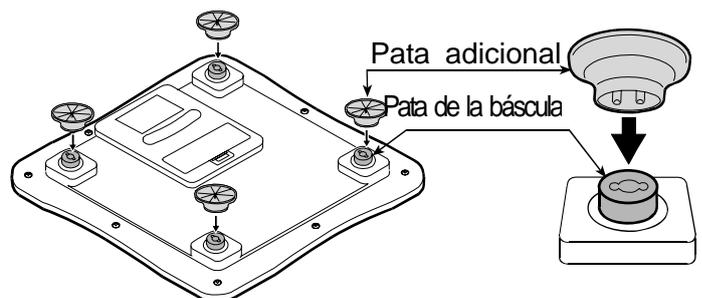


Notas

- Tenga cuidado de no caerse al utilizar las patas adicionales.
- Le recomendamos usar esta báscula sobre una superficie sólida y nivelada.

Ajuste de la unidad

Ajuste manual de la unidad

1. Confirme que la báscula está apagada.
Pulse el interruptor de **AJUSTE**. La báscula pita y muestra la unidad ajustada actualmente.
2. Pulse el interruptor de **AJUSTE** para seleccionar la unidad.
3. Tras tres segundos sin operación, la báscula confirma la unidad seleccionada con dos pitidos, aparece “End” y se apaga automáticamente.

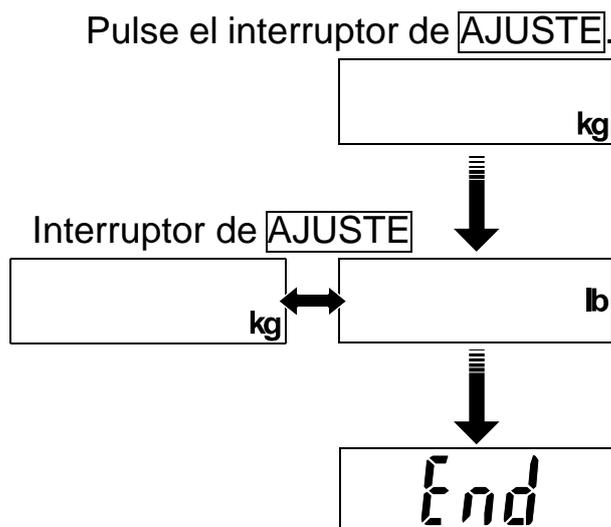


Ajuste de la unidad mediante el dispositivo de comunicación

(Solo para dispositivos en que está habilitada la opción de volver a escribir la información de la unidad).

1. Confirme que la báscula está apagada.
Mantenga el símbolo de comunicación del dispositivo compatible con NFC cerca del área de comunicación () de la báscula.
2. Cuando se ha completado la transmisión de datos, la báscula muestra “End” y se apaga automáticamente.

Ejemplo: Teléfono móvil

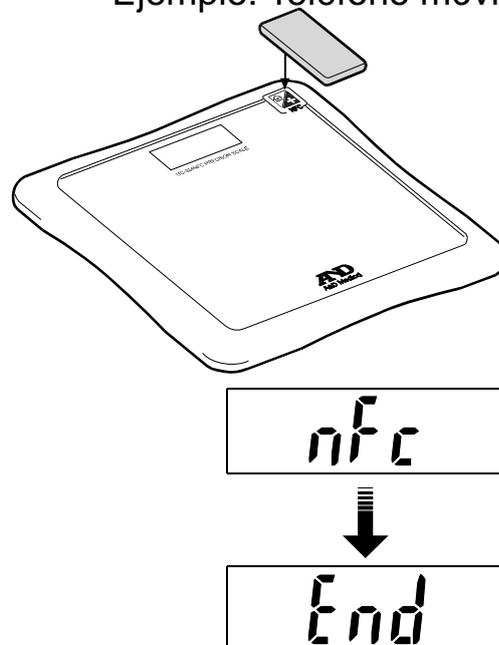

Nota

- Es posible que no se reconozca el dispositivo compatible con NFC cuando se inclina o coloca fuera del área de comunicación. Si aparece “E - 11” o “E - 12”, empiece desde el paso 1 de nuevo.

Ajuste de la memoria

La función de memoria se puede cambiar mediante el dispositivo de comunicación y el número de memorias puede cambiarse de "0" a "100".

Cuando el número de mediciones se ajusta a "100", es posible tanto la transmisión como el borrado de las lecturas.

Para obtener detalles, consulte el manual de instrucciones de la aplicación que usa.

Nota

- Cuando solo se usa la báscula sola, no está disponible el cambio de número de mediciones para guardar, mostrar o borrar los datos de la memoria.

1. Confirme que la báscula está apagada.



Mantenga el símbolo de comunicación del dispositivo compatible con NFC cerca del área de comunicación () de la báscula.

2. Cuando se ha completado la transmisión de datos, la báscula muestra "End" y se apaga automáticamente.

Notas

- Es posible que no se reconozca el dispositivo compatible con NFC cuando se inclina o coloca fuera del área de comunicación. Si aparece "E - 11" o "E - 12", empiece desde el paso 1 de nuevo.
- Si intenta transmitir los datos de memoria cuando el número de mediciones que se van a guardar en memoria se ha ajustado a 0, aparece "E - 13".
- Cuando cambia el número de mediciones a guardar en memoria de 100 a 0, los datos de memoria, si hay, se borrarán.

Ejemplo: Teléfono móvil

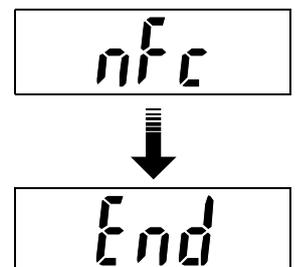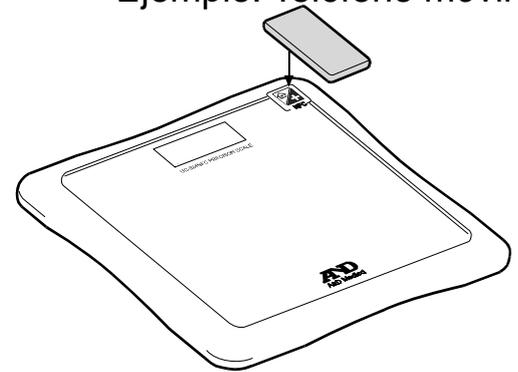

Medición de su peso con la función NFC

Después de la medición, el dispositivo de comunicación recibe el dato.

1. Confirme que la báscula está apagada.

Súbase a la báscula con cuidado y quédese quieto durante la medición. La báscula se enciende y aparecen todos los segmentos de la pantalla.

2. Espere que la medición se complete.

El proceso de medición se muestra con el segmento “-”.

3. Bájese de la báscula cuando el símbolo estable  aparece con tres pitidos.

Si no se baja de la báscula, la báscula pita una vez cada dos segundos y la báscula se apaga tras dos minutos.

4. La báscula muestra todos los segmentos de visualización.

No se suba a la báscula.

5. Aparece el resultado de medición.


6. Mantenga el símbolo de comunicación del dispositivo compatible con NFC cerca del área de comunicación

 de la báscula.

7. Cuando se ha completado la transmisión de los datos personales, la báscula muestra “End”.

Notas

- Es posible que no se reconozca el dispositivo compatible con NFC cuando se inclina o coloca fuera del área de comunicación. Si aparece “E - 11” o “E - 12”, empiece desde el paso 6 de nuevo.
- Después de que se muestre el resultado de medición alrededor de tres minutos, la báscula se apagará automáticamente. Cuando el número de mediciones que guarda en memoria se ha ajustado a 0, se borrará el resultado.
- Cuando se realiza la transmisión de datos mientras se muestra el resultado, solo se transmitirá el resultado actual.

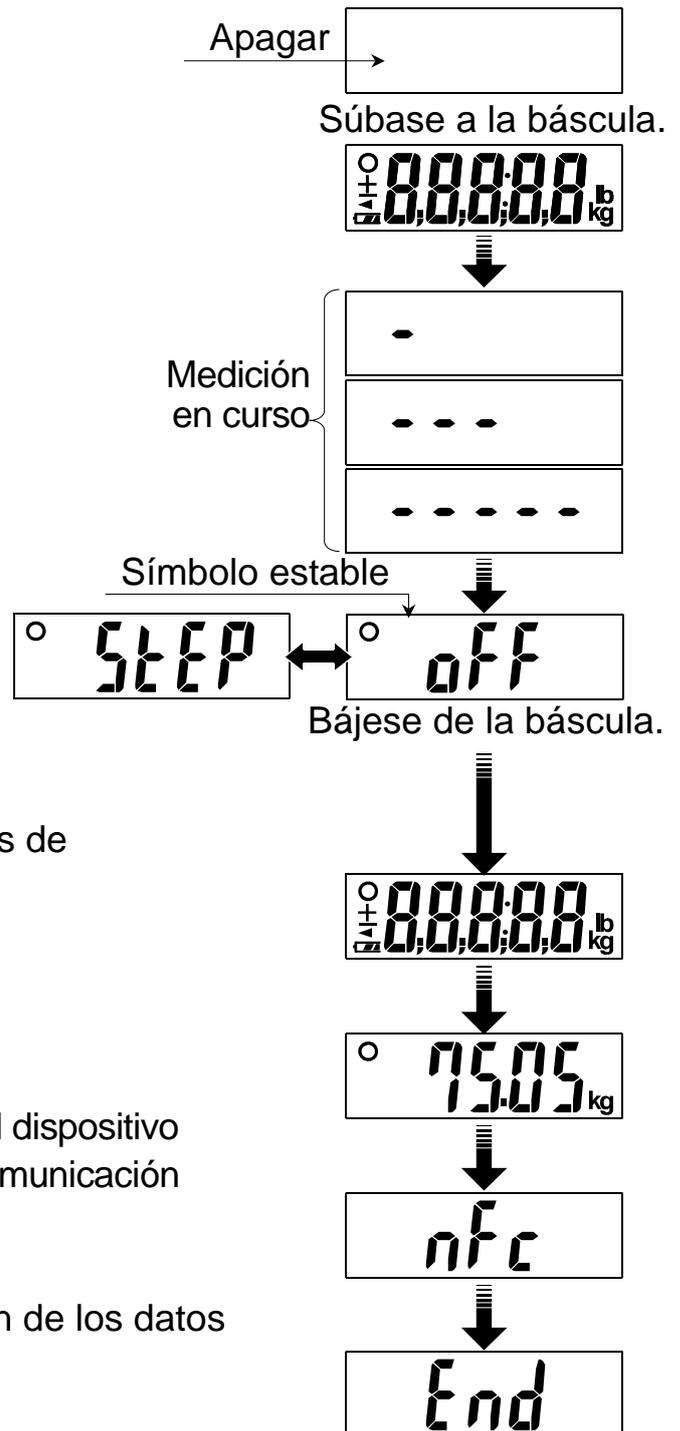

Mantenimiento de la báscula

- Limpie la báscula con un paño suave y seco o con un paño humedecido con agua y detergente suave. Nunca utilice alcohol, bencina, diluyentes ni otros productos químicos agresivos para limpiar la báscula.
- Si no va a utilizar la báscula durante un periodo de tiempo prolongado, extraiga las pilas del compartimento de las pilas.

Antes de solicitar una reparación

Problemas	Razón posible / Medida correctiva
 aparece en pantalla.	Supera la capacidad máxima.
 aparece en pantalla.	
 aparece en pantalla.	Supera la capacidad máxima. No alcanza la capacidad mínima.
 aparece en pantalla.	El dispositivo de comunicación puede estar inclinado o colocado fuera del área de comunicación de la báscula.
 aparece en pantalla.	
 aparece en pantalla.	
 aparece en pantalla.	El número de mediciones a guardar en memoria se ha ajustado a 0.
 aparece en pantalla.	Supera la capacidad máxima.
 aparece en pantalla.	
 aparece en pantalla.	
No se ve nada al dar un toque a la báscula o pulsar el interruptor de AJUSTE .	Retire las pilas y vuelva a colocarlas. O, cambie las cuatro pilas por cuatro nuevas.
Los resultados de medición son muy diferentes de los valores esperados.	Coloque la báscula sobre una superficie sólida y nivelada. Retire cualquier objeto extraño que pueda estar tocando la parte inferior de la báscula. Si coloca la báscula sobre una alfombra, asegúrese de haber colocado las patas adicionales o pruebe a trasladarla a una superficie nivelada de baldosas o madera.

Si no puede identificar el problema y solucionarlo, póngase en contacto con su proveedor o con A&D service group. A&D service group suministrará a los proveedores autorizados información técnica, piezas de recambio y unidades.

Precaución al usar la función NFC

La báscula tiene un módulo de interfaz inalámbrica de etiqueta tipo 3 foro NFC integrado.

Cuando la báscula se usa cerca de los dispositivos de comunicación inalámbrica que usan la misma frecuencia que la de la báscula (13,56 MHz) o usan sus frecuencias armónicas, se puede producir interferencia electromagnética. En dicho caso, apague los dispositivos que no están siendo usados o coloque los dispositivos a 1 metro o más de la báscula.

Especificaciones

Tipo	UC-324NFC
Capacidad máxima	150 kg / 330 lb
Capacidad mínima	10 kg / 22 lb
Indicación mínima en pantalla	0 a 100 kg: 0,05 kg, 100 a 150 kg: 0.1 kg 0 a 330 lb: 0,1 lb
Comunicación inalámbrica	Módulo de interfaz inalámbrica NFC
Elementos de ajuste	Unidad: kg o lb
Memoria	Mediciones 0 o 100 (solo para dispositivos en los que se ha habilitado la reescritura de los datos de memoria)
Fuente de alimentación	Cuatro pilas tipo AA (R6P o LR6, 1,5 voltios x 4)
Duración de las pilas	Aproximadamente 1 años (con dos mediciones al día usando las pilas alcalinas)
Dimensiones	350 (F) X 350 (An) X 39 (Al) mm
Masa	2,3 kg incluidas las pilas
Accesorios	Manual de instrucciones, pilas (4), patas adicionales (4)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación alguna por parte del fabricante.

Cumplimiento de las directivas europeas

 La báscula cumple con la directiva legal EMC (Compatibilidad electromagnética) 2004/108/CE.

Nota: Solo para uso en interiores. El valor indicado puede verse afectado negativamente en caso de influencias electromagnéticas extremas.



A&D Company, Limited

1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama 364-8585 JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111 Fax: [81] (48) 593-1119

A&D INSTRUMENTS LIMITED

Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire
OX14 1DY United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420 Fax: [44] (1235) 550485

A&D ENGINEERING, INC.

1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131 U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333 Fax: [1] (408) 263-0119

A&D Australasia PTY LTD

32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031 AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100 Fax: [61] (8) 8352-7409