

Ear Thermometer

Model UT-601

Instruction Manual
Original

NGLISH

Manuel d'instructions

RANÇAIS

Manual de Instrucciones

SPAÑOL

Manuale di Istruzioni

PALIAN

使用手册

×

Table des matières

Cher client	2
Remarques préliminaires	2
Précautions	2
dentification des pièces	3
Symboles	4
Fonctions	5
Utilisation du thermomètre	6
Installation/Remplacement des piles	6
Mesure de la température auriculaire	
Mesure de la température de liquides ou d'objets	8
Mesure de la température de l'air	8
Problèmes et solutions	9
Erreurs	9
Entretien	. 10
Données techniques	. 10
nstructions relatives au contrôle et vérification du calibrage	. 11

Cher client

Vous venez d'acquérir un thermomètre auriculaire A&D, actuellement l' un des plus avancés du marché.

Nous vous recommandons de lire attentivement le présent manuel avant la première utilisation.

Remarques préliminaires

Cet appareil est conforme à la directive européenne 93/42 CEE relative aux dispositifs médicaux. Le marquage C C 0366 est la preuve de ladite conformité. (0366: numéro de référence de l'organisme notifié compétent)
Lieu d'utilisation Cet appareil est conçu pour être utilisé à l'intérieur.


Précautions

Ce thermomètre comporte des pièces de précision. Par conséquent, évitez
de l'exposer à de fortes températures, à une humidité trop importante et à la lumière directe du soleil. De même, il faut éviter les chocs et le protéger de la
poussière.
Le thermomètre n'est pas étanche. Protégez le thermomètre de la pluie,
de la condensation et de l'eau.
Les mesures peuvent être faussées si le thermomètre est utilisé près
d'un poste de télévision, d'un four à micro-ondes, d'un téléphone
cellulaire, d'un appareil à rayons X ou de tout autre appareil dégageant
de forts champs magnétiques.
Conservez le thermomètre hors de portée des enfants.
Pour garantir la précision, la lentille de la sonde doit toujours être propre.
Vous devez ôter le capuchon de la sonde pour utiliser le thermomètre.
Pour des raisons d'hygiène, nettoyez la sonde après chaque utilisation.
Utilisez un coton-tige ou un chiffon doux humecté d'alcool. Veillez à ce
que l'alcool ne pénètre pas dans le thermomètre. Laissez sécher
plusieurs minutes avant de le réutiliser.
Nettoyez l'extérieur du thermomètre à l'aide d'un chiffon doux et propre.
N'utilisez pas de détergents abrasifs et ne le plongez pas dans l'eau ni
dans aucun autre liquide.
Les appareils, pièces et piles usagés ne doivent pas être traités comme


de simples déchets ménagers ; ils doivent être éliminés conformément

aux réglementations locales en vigueur.

Identification des pièces

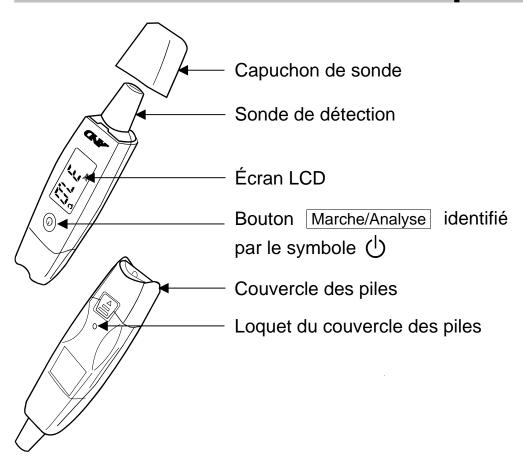

Éléments de l'écran

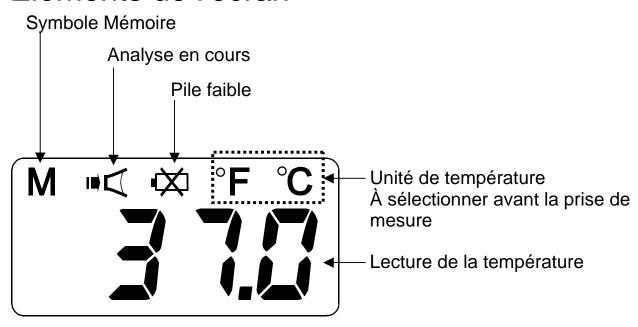

3

Symboles

0 1 1	F (: /0: ::: ::	A (* 1117
Symboles	Fonction/Signification	Action conseillée
ψ	Pour allumer ou éteindre l'appareil.	
	Courant continu	
SN	Numéro de série	
2009	Date de fabrication	
*	Type B : l'appareil est doté d'une protection spéciale contre les chocs électriques.	
M	Dernière mesure stockée en mémoire.	
OFF	le thermomètre s'éteint automatiquement après 30 secondes d'inutilisation.	
 ₩	Quand ce symbole s'affiche : l'autonomie des piles est faible. Mesures encore possibles.	Remplacez les deux piles par des neuves dès que possible.
•••	Quand ce symbole clignote : l'autonomie des piles est faible. Mesure impossible.	Remplacez les deux piles par des neuves.
ErH	La température ambiante est supérieure à 40 °C.	Vous pouvez utiliser le thermomètre dans un
ErL	La température ambiante est inférieure à 5 °C.	environnement allant de 5 à 40 °C.
22*1	Le séparateur décimal clignote : la mesure est supérieure à la plage de température corporelle de 34 °C à 42,2 °C.	Reprenez la mesure.
HI	La mesure est supérieure à 100 °C.	N'utilisez pas le thermomètre pour mesurer la température
Lo	La mesure est inférieure à 0 °C.	de cet objet.
C E 0366	Étiquette CE relative aux dispositifs médicaux	
	Étiquette DEEE	
	Fabricant	
EC REP	Mandataire européen	

Fonctions

Le thermomètre auriculaire UT-601 est un thermomètre multi-usage. Il mesure la température du corps par le conduit auditif. Il mesure également rapidement et sans contact la température de matières solides, liquides ou de l'air.

Le thermomètre mesure le rayonnement infrarouge émis par la membrane du tympan ou par d'autres objets. La température auriculaire reflète précisément la température intérieure du corps tandis que la membrane du tympan partage la circulation du sang avec le centre de contrôle de température dans le cerveau (hypothalamus).


Pour garantir la précision de la mesure, le thermomètre effectue une analyse continue tant que le bouton Marche/Analyse est enfoncé et affiche la température la plus élevée.

Détection 0 °C à 100 °C (32 °F à 212 °F) La plage de température affichée varie entre 0 °C et 100 °C. Par conséquent, outre la prise de température corporelle par le canal auditif, le thermomètre peut être utilisé de différentes manières. Exemples d'utilisation : Mesurer la température du lait ou de l'eau du bain de bébé. Mesurer la température de la nourriture ou de la soupe. Mesurer la température objets, de liquides ou de l'air.
Vous pouvez choisir un affichage en °C ou °F.
Fonctionnement simple à partir d'un seul bouton
Vous devez ôter le capuchon de sonde pendant la prise de mesure. Essuyez la sonde à l'aide d'un chiffon doux humecté d'alcool après utilisation.
La dernière mesure s'affiche lorsque l'appareil est mis en marche.
Analyse continue pour garantir la précision Pour garantir la précision de la mesure, le thermomètre effectue une analyse continue tant que le bouton Marche/Analyse est enfoncé et affiche la température la plus élevée.
Fonction de mise hors tension automatique Le thermomètre s'éteint automatiquement après 30 secondes d'inutilisation ou lorsque vous appuyez en continu sur le bouton Marche/Analyse pendant 30 secondes.

Utilisation du thermomètre

Installation/Remplacement des piles

- 1. Utilisez un petit objet pointu tel qu'un stylo à bille pour appuyer sur le loquet du couvercle des piles puis relâchez-le.
- Retirez le couvercle des piles en poussant les côtés du couvercle vers le haut tout en appuyant sur le loquet.
- 3. Insérez deux piles bouton LR44. Placez les pôles positifs (+) vers le haut comme indiqué par les symboles du compartiment des piles.
- 4. Replacez le couvercle des piles.
 Après avoir installé les piles, appuyez sur le bouton Marche/Analyse pour vérifier que tous les éléments de l'écran apparaissent correctement.
 Sinon, vérifiez les piles et les polarités.

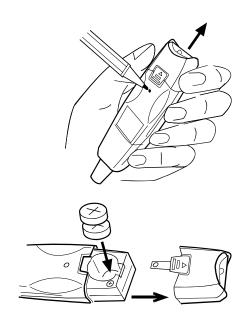

AVERTISSEMENT

- ☐ Insérez les piles comme indiqué dans le compartiment des piles. Sinon, l'appareil ne fonctionne pas.
- □ Quand le symbole □ (piles faibles) apparaît sur l'écran, cela signifie que l'autonomie des piles est faible. À ce stade, la prise de mesure est encore possible.
- □ Quand le symbole □ (piles faibles) clignote sur l'écran, vous devez remplacer les deux piles par des neuves. Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usées. Cela peut raccourcir la durée de vie des piles ou entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- ☐ La durée de vie des piles varie selon la température ambiante et peut être réduite en cas de basses températures.
- Utilisez uniquement les piles spécifiées. Les piles livrées avec l'appareil sont fournies à des fins de contrôle des performances et peuvent avoir une durée de vie limitée.
- □ Retirez les piles si vous envisagez de ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée.
 - Les piles pourraient couler et entraîner un dysfonctionnement.

Utilisation du thermomètre

Mesure de la température auriculaire

 Appuyez sur le bouton Marche/Analyse pour allumer le thermomètre. Tous les éléments de l'écran s'affichent.

Remarque: le thermomètre s'éteint

automatiquement après 30 secondes d'inutilisation.

 Sélectionnez l'unité de mesure, le cas échéant. Quand tous les éléments de l'écran s'affichent, appuyez sur le bouton Marche/Analyse puis maintenez-le enfoncé pour basculer alternativement entre °C et °F. Relâchez le bouton quand l'unité de mesure de votre choix s'affiche.

Remarque: le thermomètre s'éteint

automatiquement après 30 secondes d'inutilisation.

- La dernière mesure enregistrée dans la mémoire apparaît et l'appareil émet un court bip pour indiquer qu'il est prêt à analyser.
- 4. Insérez la sonde dans le canal auditif. Pour les bébés, tirez doucement l'oreille vers l'arrière pour redresser le canal auditif afin de faciliter l'insertion.
- 5. Appuyez sur le bouton Marche/Analyse jusqu'à ce que l'appareil émette un bip.
- 6. Relâchez le bouton Marche/Analyse.
 Un long bip est émis pour indiquer que la prise de mesure est terminée.
 Sortez le thermomètre du canal auditif, puis lisez la valeur.


Pour effectuer d'autres mesures, répétez les étapes 4 à 6.



Choix de l'unité à utiliser



Dernière mesure en mémoire

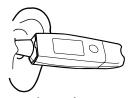

Insertion du thermomètre




Canal auditif redressé pour faciliter l'insertion

Utilisation du thermomètre

Mesure de la température de liquides ou d'objets

Remarque: la plage de température qui s'affiche varie de 0 °C à 100 °C. Si la température de l'objet se trouve en dehors de cette plage, une erreur HI ou Lo s'affiche.

- 1. Appuyez sur le bouton Marche/Analyse pour allumer le thermomètre. Tous les éléments de l'écran s'affichent.
- La dernière mesure enregistrée dans la mémoire apparaît et l'appareil émet un court bip pour indiquer qu'il est prêt à analyser.
- 3. Maintenez l'extrémité de la sonde du thermomètre environ 5 mm au-dessus de la surface du liquide ou de l'objet solide.

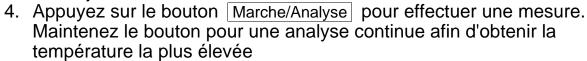

5. Relâchez le bouton Marche/Analyse. Un long bip est émis pour indiquer que la prise de mesure est terminée. Lisez la valeur.

Mesure de la température de l'air

Remarque : la température ambiante de fonctionnement varie entre 5 °C et 40 °C.

- 1. Appuyez sur le bouton Marche/Analyse pour allumer le thermomètre. Tous les éléments de l'écran s'affichent.
- 2. La dernière mesure enregistrée dans la mémoire apparaît et l'appareil émet un court bip pour indiquer qu'il est prêt à analyser.
- 3. Orientez la sonde vers n'importe quel espace environnant sans objet à proximité, puis appuyez sur le bouton Marche/Analyse.
- 4. Un long bip est émis pour indiquer que la prise de mesure est terminée. Lisez la valeur.

Remarque

- □ le thermomètre s'éteint automatiquement après 30 secondes d'inutilisation.
- □ Quand une erreur s'affiche, l'appareil émet quatre bips courts.

AVERTISSEMENT

- □ Ne mesurez pas la température d'un objet métallique.
 Vous obtiendrez une mesure faible.
- □ N'immergez pas le thermomètre dans du liquide. Cela endommagerait la lentille de la sonde.
- N'exposez pas le thermomètre aux flammes ou aux températures élevées. Cela endommagerait la lentille de la sonde.



Objet

Problèmes et solutions

Problème	Raison possible	Action conseillée
Dian no claffiche aux	Les piles sont épuisées.	Remplacez les deux piles par des neuves.
Rien ne s'affiche sur l'écran, même lorsque vous appuyez sur le bouton Marche/Analyse.	Les polarités des piles ne sont pas respectées.	Réinstallez les piles en plaçant les bornes négatives et positives conformément aux indications situées dans le compartiment des piles.

Erreurs

Affichage	Signification	Action requise
OFF	le thermomètre s'éteint automatiquement après 30 secondes d'inutilisation.	
E-H	La température ambiante est supérieure à 40 °C.	Vous pouvez utiliser le thermomètre dans un
ErL	La température ambiante est inférieure à 5 °C.	environnement allant de 5 °C à 40 °C.
22*1	Le séparateur décimal clignote : la mesure est supérieure à la plage de température corporelle de 34 °C à 42,2 °C.	Reprenez la mesure.
HI	La mesure est supérieure à 100 °C.	N'utilisez pas le thermomètre pour mesurer la température
Lo	La mesure est inférieure à 0 °C.	de cet objet.
•	Quand ce symbole s'affiche : l'autonomie des piles est faible. Mesures encore possibles.	Remplacez les deux piles par des neuves dès que possible.
	Quand ce symbole clignote : l'autonomie des piles est faible. Mesure impossible.	Remplacez les deux piles par des neuves.

Remarque : si les actions décrites ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le revendeur. Ne tentez pas d'ouvrir ni de réparer ce produit, car toute tentative de le faire rendrait caduque votre garantie.

Entretien

N'ouvrez pas l'appareil. Il est doté de composants électriques complexes qui pourraient être endommagés. Si vous ne parvenez pas à régler le problème avec les instructions de dépannage, adressez-vous au service d'assistance de votre revendeur ou au service technique A&D. Le service technique A&D fournira des informations techniques aux revendeurs agréés.

L'appareil a été calibré au moment de la fabrication.

Si, à tout moment, vous doutez de la précision des mesures, contactez votre revendeur ou le service technique A&D.

Données techniques

Type UT-601

Plage de températures 0 °C à 100 °C (32 °F à 212 °F)

affichée

Résolution d'affichage 0,1 °C ou 0,1 °F

Précision de la mesure (Dans une température ambiante de 16 °C à 35 °C)

 $34 \,^{\circ}\text{C} \, \text{à} \, 35,4 \,^{\circ}\text{C} : \pm 0,3 \,^{\circ}\text{C}$ $35,5 \,^{\circ}\text{C} \, \text{à} \, 42 \,^{\circ}\text{C} : \pm 0,2 \,^{\circ}\text{C}$ $42,1 \,^{\circ}\text{C} \, \text{to} \, 42,2 \,^{\circ}\text{C} : \pm 0,3 \,^{\circ}\text{C}$ Autres : $\pm 1.0 \,^{\circ}\text{C}$

Alimentation 3 V CC

Deux piles bouton alcalines de type LR44 (AG13)

Classification Type B 🛪

EMC EN60601-1-2 : 2007 Mémoire Dernière mesure

Température ambiante de 5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F) / jusqu'à 95 %

fonctionnement d'humidité relative

Conditions de stockage -10 °C à 60 °C / jusqu'à 90 % d'humidité relative

Dimensions 27 [P] x 18 [H] x 105 [L] mm environ

Poids 32 g environ, piles comprises

C €0366

Remarque

Spécifications sujettes à modifications sans préavis.

Pour plus d'informations sur la réglementation EMC, consultez l'adresse ci-dessous.

http://www.aandd.jp/products/manual/medical/emc_fr.pdf

Instructions relatives au contrôle et vérification du calibrage

Pour les techniciens spécialisés et qualifiés uniquement

Les vérifications de calibrage doivent être effectuées par les organismes	
ou personnes suivantes :	
□ Fabricant	
□ Organismes responsables du contrôle de la mesure	
□ Personnes qui remplissent les conditions de la réglementation nationa	le
en vigueur relatives aux appareils médicaux.	

(A) Test de fonctionnement

Le test de fonctionnement du thermomètre ne peut être effectué que sur une personne ou sur un simulateur approprié.

(B) Contrôle de l'étanchéité du circuit de température et de l'exactitude de l'affichage de la pression

Remarque	3
----------	---

•
Effectuez les mesures dans un environnement allant de 5 °C à 40 °C.
Si la température ambiante se trouve hors de cette plage de température,
une erreur, ErH ou ErL, s'affiche.
La plage de température affichée varie de 0 °C à 100 °C.
Si la température de l'objet se trouve en dehors de cette plage, une erreur,
HI ou Lo, s'affiche.

Procédure de contrôle

- 1. Appuyez sur le bouton Marche/Analyse pour allumer le thermomètre.
- 2. Placez le thermomètre sur le générateur de température standard tel qu'une source d'émission de corps noir.
- 3. le thermomètre s'éteint automatiquement après 30 secondes d'inutilisation.
- 4. Relâchez le bouton Marche/Analyse. La température mesurée s'affiche.
- Le thermomètre s'éteint automatiquement après 30 secondes d'inutilisation.



A&D Company, Limited

1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama 364-8585 JAPAN Telephone: [81] (48) 593-1111 Fax: [81] (48) 593-1119

EC REP A&D INSTRUMENTS LTD.

Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 1DY United Kingdom Telephone: [44] (1235) 550420 Fax: [44] (1235) 550485

A&D ENGINEERING, INC.

1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131 U.S.A. Telephone: [1] (408) 263-5333 Fax: [1] (408)263-0119

A&D Australasia Pty Ltd.

32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031 AUSTRALIA Telephone: [61] (8) 8301-8100 Fax: [61] (8) 8352-7409

A&D KOREA Limited 한국에이.엔.디(주)

대한민국 서울시 영등포구 여의도동 36-2 맨하탄 B/D 8층 (8th Floor, Manhattan Bldg. 36-2 Yoido-dong, Youngdeungpo-ku, Seoul, KOREA) 전화: [82] (2) 780-4101 팩스: [82] (2) 782-4280

A&D RUS CO., LTD. Компания ЭЙ энд ДИ РУС

121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17 (Bldg. 17, Vereyskaya st., Moscow, 121357 RUSSIAN FEDERATION) тел.: [7] (495) 937-33-44 факс: [7] (495) 937-55-66